

Anastomat

Dispositivo descartável para circuncisão



**A atualização
da segunda
geração**

PRODUTO REGISTRADO E IMPORTADO POR

next
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ 

**Sua saúde, nós
nos preocupamos**

Anastomat

Dispositivo descartável para circuncisão

Sobre a fábrica



Dongguan ZSR Biomedical Technology Co, LTD, uma empresa nacional de alta tecnologia, está localizada na cidade mais bonita da China, a cidade de Qingxi, e possui uma variedade de certificações de qualificação nacionais e estrangeiras, como a certificação CE da UE e a certificação FDA dos EUA.

ZSR. Um fornecedor profissional de equipamentos médicos e suprimentos de alta qualidade envolvidos em pesquisa e desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços. A ZSR está comprometida em produzir equipamentos cirúrgicos descartáveis e consumíveis e equipamentos de alta qualidade, como cirurgia urinária, departamento de andrologia, doenças respiratórias, pediatria, obstetrícia e produtos de prevenção de epidemias.

A área total da empresa é de cerca de 4.000 metros quadrados com GMP avançado, oficina limpa e instalações profissionais de esterilização de nível médico, laboratório biológico de grau 10.000 e equipamentos de teste e análise, conceitos avançados de gerenciamento e uma equipe de elite profissional eficiente e coopera com universidades e instituições de pesquisa.

Introdução

O anastomat de circuncisão descartável de segunda geração ZSR é um instrumento cirúrgico para circuncisão e cirurgia de sutura em urologia masculina. Economiza tempo e esforço e é seguro e conveniente.

O benefício da circuncisão

Fimose e prepúcio redundante:

Interpretação clínica: Tanto a fimose quanto o prepúcio redundante referem-se ao prepúcio que cobre toda a glândula do pênis. A diferença é que o prepúcio redundante refere-se à cobertura do prepúcio da glândula do pênis. Assim, a glândula do pênis não pode ser completamente exposta; enquanto a fimose se refere ao prepúcio que não pode virar para cima e para baixo, e a boca do prepúcio é muito pequena.

Para reduzir a probabilidade de ocorrência de inflamação do pênis e outras doenças e para melhorar a qualidade do sêmen.

Para reduzir restrições e promover o desenvolvimento secundário do pênis.

Prolongar a duração da vida sexual e melhorar a qualidade.

Reduza efetivamente a criação de microrganismos para tornar a vida mais saudável.

Reduzir os fatores de risco de infecção recíproca entre o casal.



PRODUTO REGISTRADO
E IMPORTADO POR

next
IMPLANTES
RIO DE JANEIRO - RJ

Anastomat

Dispositivo descartável para circuncisão

Novo dispositivo de circuncisão de segunda geração ZSR atualizado



Grande janela de operação visual.
A posição do prepúcio pode ser ajustada a qualquer momento.
Linha de criação visível.
A tensão está sob controle.

O assento côncavo integrado em metal e a janela de observação do frênulo super grande tornam a operação mais estável.
Mais estável para operar. Melhor sutura.



Dispositivo exclusivo de travamento da alça. Pode ser travado apertando a alça, sem pressionar longamente.
Nova estrutura de braço de força.
Alça super longa e que economiza trabalho.

Nova sutura especial para crianças.
O espaço da sutura é menor e a sutura é mais apertada.
Dispositivo exclusivo para fixar e proteger com o frênulo.
Totalmente protegido com o frênulo.
Orientação profissional e garantia de segurança.



PRODUTO REGISTRADO
E IMPORTADO POR

next
IMPLANTES
RIO DE JANEIRO - RJ

Anastomat

Dispositivo descartável para circuncisão

Instrução de Operação

1



Selecione o tamanho apropriado e coloque o copo dentro do prepúcio. (Se o prepúcio estiver aderente, deve ser separado do pênis). Se for uma fimose, o orifício prepucial deve ser expandido ou aberto com uma tesoura.

2




Faça o prepúcio virar para fora e deforme a parte externa do copo e cubra a glande. O dispositivo protetor do frênuo do copo prende a parte amarrada.

3



Remova cuidadosamente a tampa protetora do dispositivo e insira lentamente o parafuso do copo bem fixado no orifício central do corpo principal do Anastomat. Em seguida, gire o botão de ajuste no sentido horário para fazer a linha de marcação no meio da janela de travamento.

4

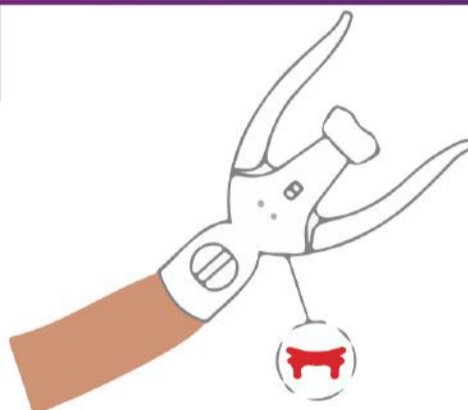


O local de corte do prepúcio pode ser ajustado através da janela de observação. Depois de feito o ajuste, certifique-se se o local onde será cortado o prepúcio está correto ou não e se o prepúcio está solto ou não. Depois que tudo estiver confirmado sem problemas, retire o alfinete de segurança.

5



Apertar rapidamente a alça e segurar o punho flexível com força para acionar o Anastomat. Depois que a alça travar automaticamente por 15 segundos, pressione o botão de trava para baixo para liberar a alça. (Para evitar sangramento, use imediatamente gaze seca para pressionar o local da operação e parar o sangramento por 2 minutos.)

6

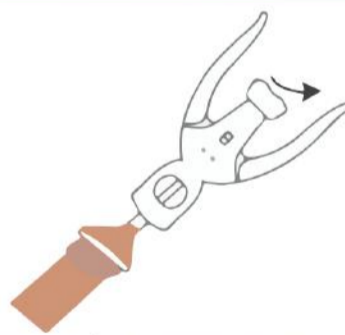

Afrouxe o punho flexível. Desparafuse o botão de ajuste no sentido anti-horário e lentamente e observe a parte afetada. Desparafuse lentamente e retire o copo, bem como o prepúcio removido e observe se o prepúcio está preso ou não. Se o prepúcio estiver preso, pressione levemente com os dedos ou uma tesoura e então o prepúcio se separará naturalmente.

Precauções de uso e cuidados pós-operatórios

- 1- Este produto é apenas para uso único. Por favor, não o desinfete repetidamente para uso.
- 2- Em princípio, escolha o tamanho maior, se ambos os tamanhos forem adequados para os pacientes.
- 3- É proibido ter relações sexuais dentro de um mês após a operação.
- 4- Três dias após a operação, o paciente retornará ao hospital para exame. O iodo pode ser usado para desinfetar a ferida e mantê-la seca para prevenir infecções.
- 5- Após a operação, o paciente deve seguir as orientações do médico, coordenar os cuidados pós-operatórios e usar medicamentos. Antes da recuperação pós-operatória, é proibido ingerir bebidas alcoólicas e comer frutos do mar.
- 6- Após a cicatrização da ferida, os grampos cairão lentamente em uma semana. Devido aos diferentes físicos, alguns pacientes precisarão de mais tempo para que os grampos caiam. Se o grampo não cair em 4 semanas, o paciente deverá voltar ao hospital para removê-la manualmente.

PRODUTO REGISTRADO
E IMPORTADO POR

next
IMPLANTES
RIO DE JANEIRO - RJ

Anastomat

Dispositivo descartável para circuncisão

Garantia de Qualidade



Modelo

**Versão
1.0**

A ZSR-DCA-12, ZSR-DCA-14, ZSR-DCA-16, ZSR-DCA-18
ZSR-DCA-22, ZSR-DCA-26, ZSR-DCA-30A, ZSR-DCA-34

B ZSR-DCA-12B, ZSR-DCA-14B, ZSR-DCA-16B, ZSR-DCA-18B
ZSR-DCA-22B, ZSR-DCA-26B, ZSR-DCA-30B, ZSR-DCA-34B


**Versão
2.0**

C ZSR-DCA-12C, ZSR-DCA-14C, ZSR-DCA-16C, ZSR-DCA-18C
ZSR-DCA-22C, ZSR-DCA-26C, ZSR-DCA-30C, ZSR-DCA-34C


D ZSR-DCA-12D, ZSR-DCA-14D, ZSR-DCA-16D, ZSR-DCA-18D
ZSR-DCA-22D, ZSR-DCA-26D, ZSR-DCA-30D, ZSR-DCA-34D

As especificações, formato e cor do dispositivo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e sujeitos à ficha de configuração real do produto.

Escala de medida

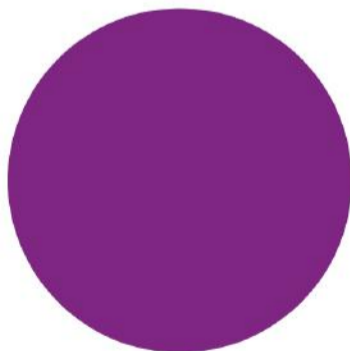

Modelo: 34

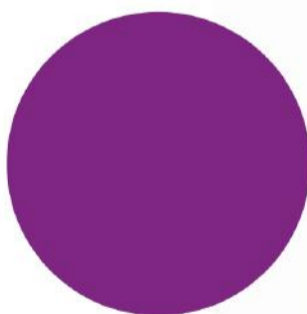

Modelo: 30



Modelo: 26



Modelo: 22



Modelo: 12



Modelo: 14



Modelo: 16



Modelo: 18

PRODUTO REGISTRADO
E IMPORTADO POR

next
IMPLANTES
RIO DE JANEIRO - RJ


Anastomat

Dispositivo descartável para circuncisão

Anel de silicone faz a diferença

Vantagens do anel de silicone

- 1- Utilizado para estabilizar grampos durante a sutura e obter pontos cosméticos.
- 2- Melhora a hemostasia.
- 3- Atua como uma placa de silicone para prevenir o desenvolvimento de cicatriz quelóide.
- 4- Simplifique a liberação de grampos durante o processo de cicatrização.

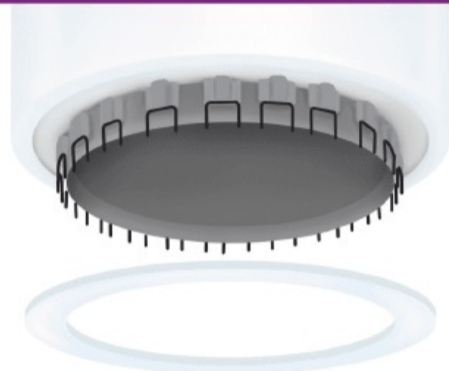

Corte o silicone em 4 pontos



Grande janela de operação visual
A posição do prepúcio pode ser ajustada a qualquer momento.
Linha de marcação visível
A tensão está sob controle.

Assento côncavo integrado em metal e frênuo super grande janela de observação, torna a operação mais estável. Mais estável para operar. Melhor sutura.



Novo grampo especial para crianças o espaço da sutura é menor e a sutura é mais apertada. Dispositivo exclusivo para fixar e proteger com o frênuo Totalmente protegido com o frênuo Orientação profissional e garantia de segurança.

PRODUTO REGISTRADO
E IMPORTADO POR

next
IMPLANTES
RIO DE JANEIRO - RJ

Anastomat


Dispositivo descartável para circuncisão

Especificações do dispositivo


Dispositivo utilizado em cirurgia de sutura de circuncisão genital masculina. Adequado para pacientes com fimose e prepúcio redundante.

Com diferentes referências de acordo com o diâmetro da glândula do paciente. Anel de silicone circular, integrado com os agrafos que conferem 2 características únicas: Os agrafos não migram sob a pele durante a cicatrização. Facilita a sua remoção espontânea após a cicatrização.

Escala de medida

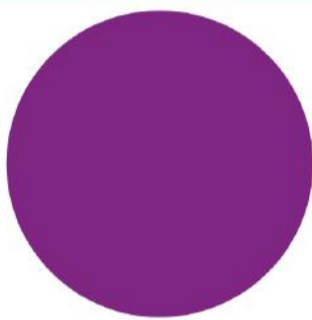

Modelo: 34

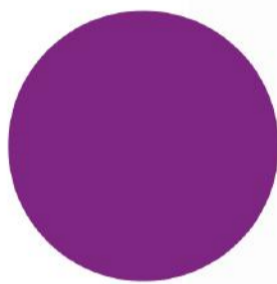

Modelo: 30



Modelo: 26



Modelo: 22



Modelo: 12



Modelo: 14




Modelo: 16



Modelo: 18


Como selecionar o Tamanho

Ângulo de 40°,
paralelo a coroa
do pênis

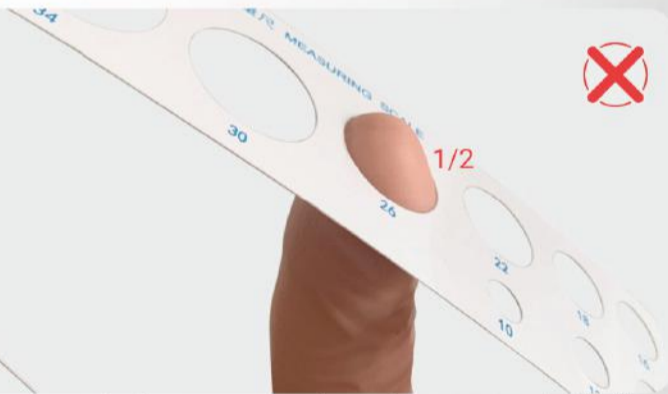

O tamanho 26 é muito pequeno para este paciente. Sempre selecione um tamanho maior em caso de dúvidas.

Ângulo de 40°,
paralelo a coroa
do pênis

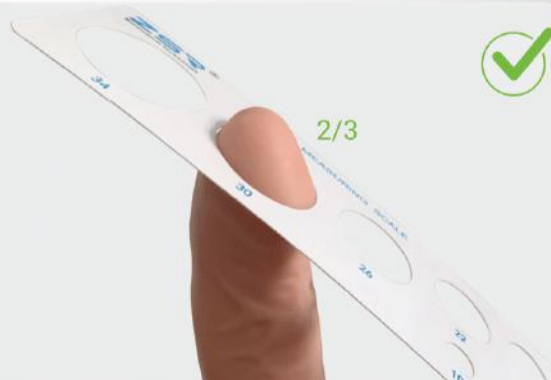

O tamanho 30 é o tamanho bom para esse paciente. Encontre sempre as proporções 1/3 - 2/3.

PRODUTO REGISTRADO
E IMPORTADO POR

next
IMPLANTES
RIO DE JANEIRO - RJ



PRODUTO REGISTRADO E IMPORTADO POR

next
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ



☎ **21 3253-2373**

☎ **21 3253-2374**

Rua Eng. Enaldo Cravo Peixoto, 105 – Salas 1003/1006 – Tijuca - Rio de Janeiro – RJ

🌐 | nextRJ.com.br

📷 | [next.implantes](https://www.instagram.com/next.implantes)