

CHIROKLIP™

Clipe descartável de auto fixação



next
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ 

CHIROKLIP™

Clipe descartável de auto fixação

Micro fixador externo bloqueado

Concretizado como um novo conceito na correção de fraturas de extremidades, o Chiroklip é um micro clipe descartável de auto fixação em forma de borboleta, utilizado para proteger as extremidades dos pinos externos.



BENEFÍCIOS:

- Estéril, pronto para uso;
- Ergonomicamente projetado para os cirurgiões;
- Pode ser utilizado nos fios de 0,5mm a 4mm;
- Ajuda na remoção dos fios pela sua eficiente fixação;
- Não necessita de nenhum instrumental específico;
- Fácil de ser aplicado.






next
IMPLANTES
RIO DE JANEIRO - RJ

CHIROKLIP™

Clipe descartável de auto fixação

TÉCNICA CIRÚRGICA

- Reduza a fratura;
- Passe dois pinos intramedulares pela fratura;
- Coloque o ChiroKlip ainda com papel na ponta afiada, para não machucar;
- Após os fios estarem satisfatórios pelo RX, dobre os fios, remova o papel e fixe o Chiroklip rigidamente ao fio;
- Certifique se que o fio esteja em uma distância adequada à pele.

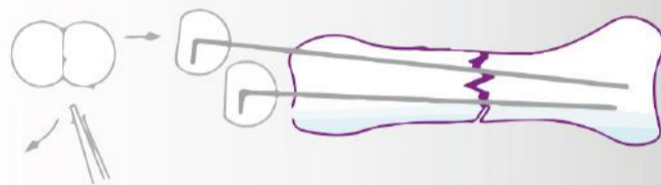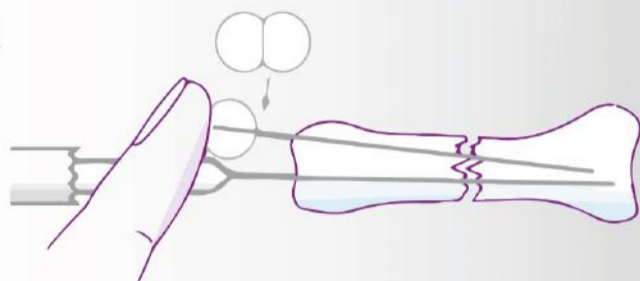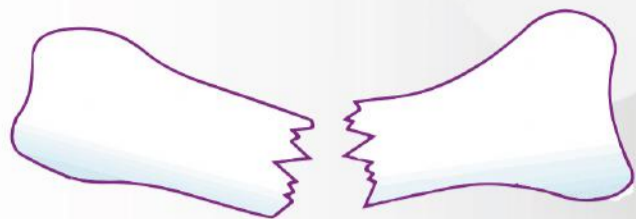

JUSTIFICATIVA CHIROKLIP

Concretizado como um novo conceito nas cirurgias com utilização de pinos e fios, o Chiroklip é um clipe descartável de auto fixação em forma de borboleta, utilizado para proteger as extremidades dos fios e pinos salientes no pós-operatório. Faz se necessário o uso do Chiroklip devido a possibilidade de migração do fio implantado para fixação da fratura e/ou osteotomia do osso (nome do osso), além de minimizar a possibilidade de migração do fio podemos citar a proteção da ponta do mesmo de traumas externos.

COMO SOLICITAR O CHIROKLIP:

- 1 fio smartwire de 0,9mm
- 1 fixador externo bloqueado Chiroklip

CÓDIGO TUSS

04.08.02.053-9

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO / FRATURA-LUXAÇÃO METACARPO-FALANGIANA

Procedimento de recuperação Anatômica das fraturas e/ou fratura-luxações metacarpo-falangeanas, quando for possível, através de procedimento aberto, fixando com material de síntese os fragmentos fraturários, e/ou luxados, reduzidos e restabelecendo a integridade articular, quando for o caso.

next
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ



next
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ 

 **21 3253-2373**

 **21 3253-2374**

Rua Eng. Enaldo Cravo Peixoto, 105 – Salas 1003/1006 – Tijuca - Rio de Janeiro – RJ

 | nextRJ.com.br

 | [next.implantes](https://www.instagram.com/next.implantes)