

# Kit OSTEOINJECT PRECISION



next  
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ 


Registro ANVISA: 82209529239

# Kit OSTEOINJECT PRECISION

O Kit OSTEOINJECT PRECISION, é projetado para fornecer uma solução abrangente em procedimentos cirúrgicos ósseos. Este kit é essencial para a aplicação de enxerto ósseo sintético em suas diversas aplicações, carreadores de antibiótico e enxerto ósseo autólogo, adaptando-se com eficácia a uma variedade de cenários clínicos.



Lesões císticas ósseas, tumorais ou osteomielite.

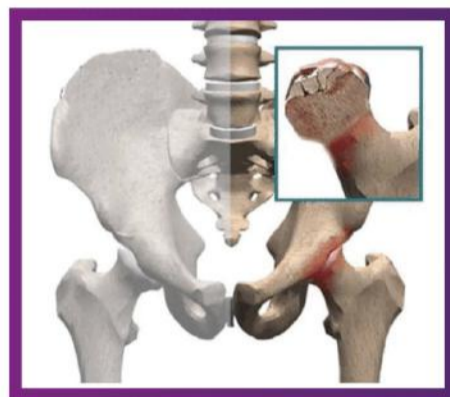

\*\*Cavidade do Fêmur feita pela Lamina Inside Core Evolution\*\*

Cavidade óssea e canal de acesso totalmente preenchidos com enxerto ósseo.

Cânula de acesso no canal medular Sonovisível com Obturador.

Introduzir a cânula para aplicação de saída lateral (ou pode ser usado a cânula de saída reta, à escolha do cirurgião), acoplado ao enxerto injetável de secagem rápida.

Utilize o obturador da cânula de aplicação saída reta ou lateral), para empurrar o enxerto existente na cânula para preencher toda a cavidade óssea.

\*\*BetaPro Inject de 20cc\*\*

Composto por instrumentos especializados, o kit inclui por cânulas de acesso principal, cânulas para aplicação de enxertos e um empurrador de enxerto, o kit é versátil e eficaz. Esses instrumentos são projetados para otimizar o acesso ao local da lesão, garantindo o preenchimento de espaços vazios, quando necessário.

next  
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ


# Kit OSTEOINJECT PRECISION

Ideal para uso em cirurgias que demandam uma abordagem cuidadosa e detalhada, o kit atende às necessidades de procedimentos como descompressão de cabeça de fêmur, lesões císticas ósseas, lesões tumorais, osteomielite e tratamento de lesões ósseas medulares e outras situações que requerem intervenção óssea precisa. Além disso, a versatilidade dos componentes do kit permite sua aplicação em diferentes partes do esqueleto, aumentando a abrangência de uso e a eficácia clínica.



## COMPOSIÇÃO:

- 1 Cânula de acesso no canal medular Sonovisível
- 1 Obturador da Cânula de Acesso Medular
- 1 Cânula para aplicação de saída lateral
- 1 Obturador da Cânula de saída lateral
- 1 Cânula para aplicação de saída reta
- 1 Obturador da Cânula de saída reta

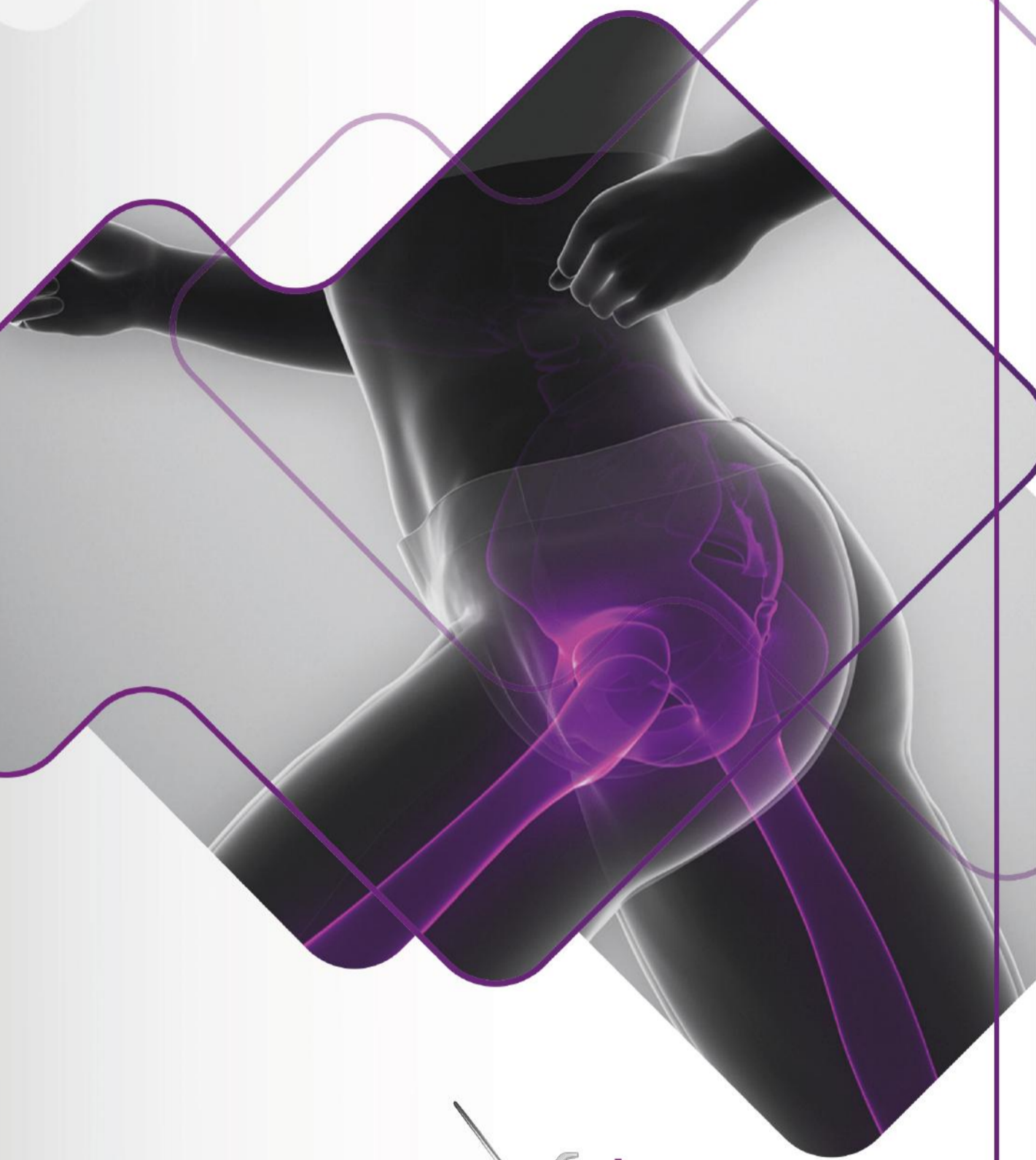

next  
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ 

 **21 3253-2373**

 **21 3253-2374**

Rua Eng. Enaldo Cravo Peixoto, 105 – Salas 1003/1006 – Tijuca - Rio de Janeiro – RJ

 | [nextRJ.com.br](http://nextRJ.com.br)

 | [next.implantes](https://www.instagram.com/next.implantes)