


Kit de **SUBCONDROPLASTIA HÍBRIDO**

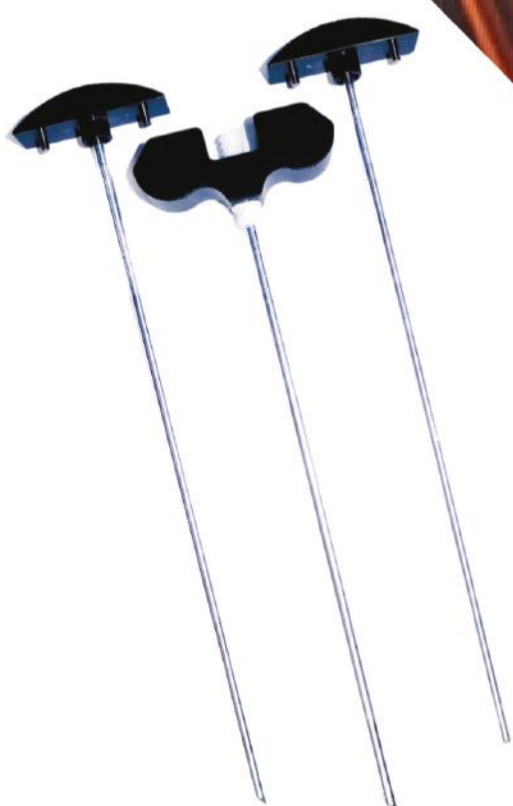

next
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ 



Kit de SUBCONDROPLASTIA HÍBRIDO

Mais precisão para uma melhor recuperação

A Subcondroplastia é um tratamento minimamente invasivo para alguns casos específicos de artrose, associados a lesão medular óssea, e consiste em preencher as lesões ósseas medulares com um substituto ósseo a Base de Beta-TCP, o β pro Inject.

O preenchimento estabiliza as lesões e auxilia no processo de recuperação, melhorando a dor e facilitando as atividades do paciente.



O Kit Cânula Instrumental para Subcondroplastia Híbrido, foi elaborado para facilitar o procedimento de mesmo nome, dando ao cirurgião uma opção descartável e completa para a cirurgia, minimizando tempo da cirurgia e otimizando resultado pós-cirúrgico, além de não necessitar adquirir duas marcas de materiais, já que a cirurgia se completa, com a utilização do enxerto β pro Inject.

Kit de SUBCONDROPLASTIA HÍBRIDO

Modo de utilização:

- Abertura da caixa, verificando se todas as etiquetas informativas e os lacres estão presentes.
- Abertura do Blister, retirando o papel Tyvek que sela.
- Caso seja de preferência do cirurgião, pode ser utilizado o bisturi que acompanha o Kit para iniciar a incisão no tecido mole.
- Colocar o trocarter dentro da cânula de injeção, observando a seta indicadora presente em ambas as partes, até que elas se encaixem.
- Inserir a cânula com o trocarter dentro da incisão.
- Com o auxílio de um martelo (não acompanha o Kit), e com o vídeo (ultrasson), fazer a incisão óssea até o local da lesão, observando a seta indicadora presente na cânula, que é onde irá direcionar o fluxo do enxerto ósseo.



- Kit MultCell e Bpro Inject

As MSCs são provavelmente as células mais interessantes quando se trata de aplicações ortopédicas, devido ao seu potencial de diferenciação tanto no osso quanto na cartilagem. O Kit descartável para Sucção Intra Ossea MultCell, permite a aspiração por múltiplos furos, proporcionando a maior qualidade e quantidade de aspirado de medula óssea.

- Usar a Cânula Multcell 3 cm abaixo da Cortical do Fêmur Distal ou Tíbia Proximal.
- Abertura da caixa, verificando se todas as etiquetas informativas e os lacres estão presentes.
- Abertura do Blister, retirando o papel Tyvek que sela o mesmo.
- O aplicador do enxerto estará na posição “Closed”, girar até a posição “Transfer”, e pressionar êmbolo fazendo com que o líquido seja transferido para o enxerto em pó.



Kit de SUBCONDROPLASTIA HÍBRIDO

- Girar até a posição “closed” novamente.
- O êmbolo da parte em pó, serve como misturador. Misturar girando o êmbolo, até que o líquido e pó se misturem, transformando-se em uma pasta uniforme, isso deve ocorrer em alguns minutos.
- Após a pasta estar uniforme, girar a trava do aplicador até a posição “Bpro Inject” e encaixar o êmbolo que está na câmara do líquido, para o êmbolo da câmara do pó.
- Retirar o Trocarter de dentro da cânula de aplicação de enxerto.
- O aplicador do Bpro Inject pode ser colocado diretamente no encaixe da cânula de aplicação do enxerto, ou pode ser fracionado nos aplicadores de menor volume. Caso o cirurgião prefira o fracionamento, está presente no Kit um conector 3 vias para adaptar as saídas do aplicador de Bpro Inject e dos aplicadores menores.
- Empurrar o êmbolo da pasta até que fique vazio.
- Utilizar o empurrador de enxerto (ponta reta) para utilização total do enxerto.
- Retirar a cânula aplicadora do paciente.



Como solicitar o kit


TUSS 30733049 OSTEOCONDROPLASTIA
TUSS 30101310 ENXERTO COMPOSTO

LESÃO SIMPLES

1 KIT SUBCONDROPLASTIA HÍBRIDO
2 BPRO INJECT
1 MULTCELL

LESÃO BILATERAL

2 KITs SUBCONDROPLASTIA HÍBRIDO
4 BPRO INJECT
1 MULTCELL

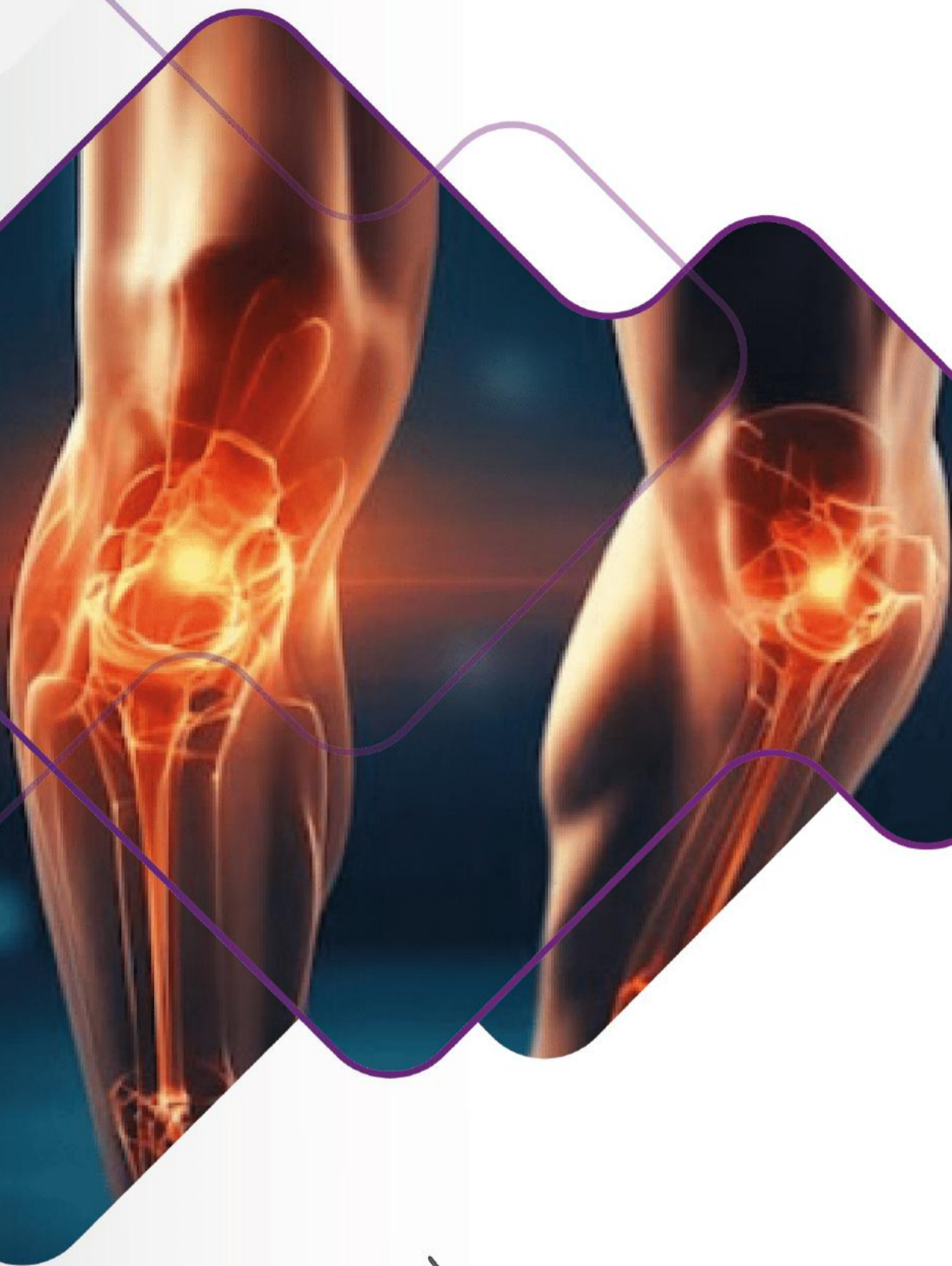

next
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ 

 **21 3253-2373**

 **21 3253-2374**

Rua Eng. Enaldo Cravo Peixoto, 105 – Salas 1003/1006 – Tijuca - Rio de Janeiro – RJ

 | nextRJ.com.br

 | [next.implantes](https://www.instagram.com/next.implantes)