

# STA

SISTEMA DE SUTURA DO  
TENDÃO DE AQUILES



next  
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ





# STA


SISTEMA DE SUTURA DO  
TENDÃO DE AQUILES

next  
IMPLANTES  
RIO DE JANEIRO - RJ


O STA foi desenvolvido para o tratamento cirúrgico minimamente invasivo da ruptura do tendão de aquiles.

Confere segurança ao procedimento de sutura percutânea permitindo o monitoramento visual da tenorrafia.

Orifícios com diâmetros progressivos garantem a correta introdução das agulhas pelos quatro braços do STA.

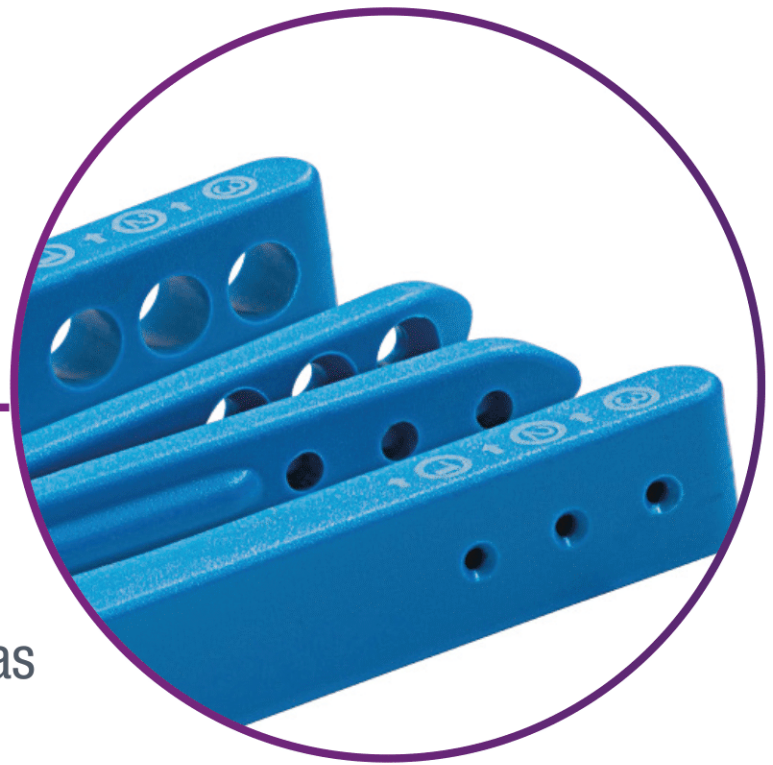

Indicado para uso com  
fio USP 2 Stitch

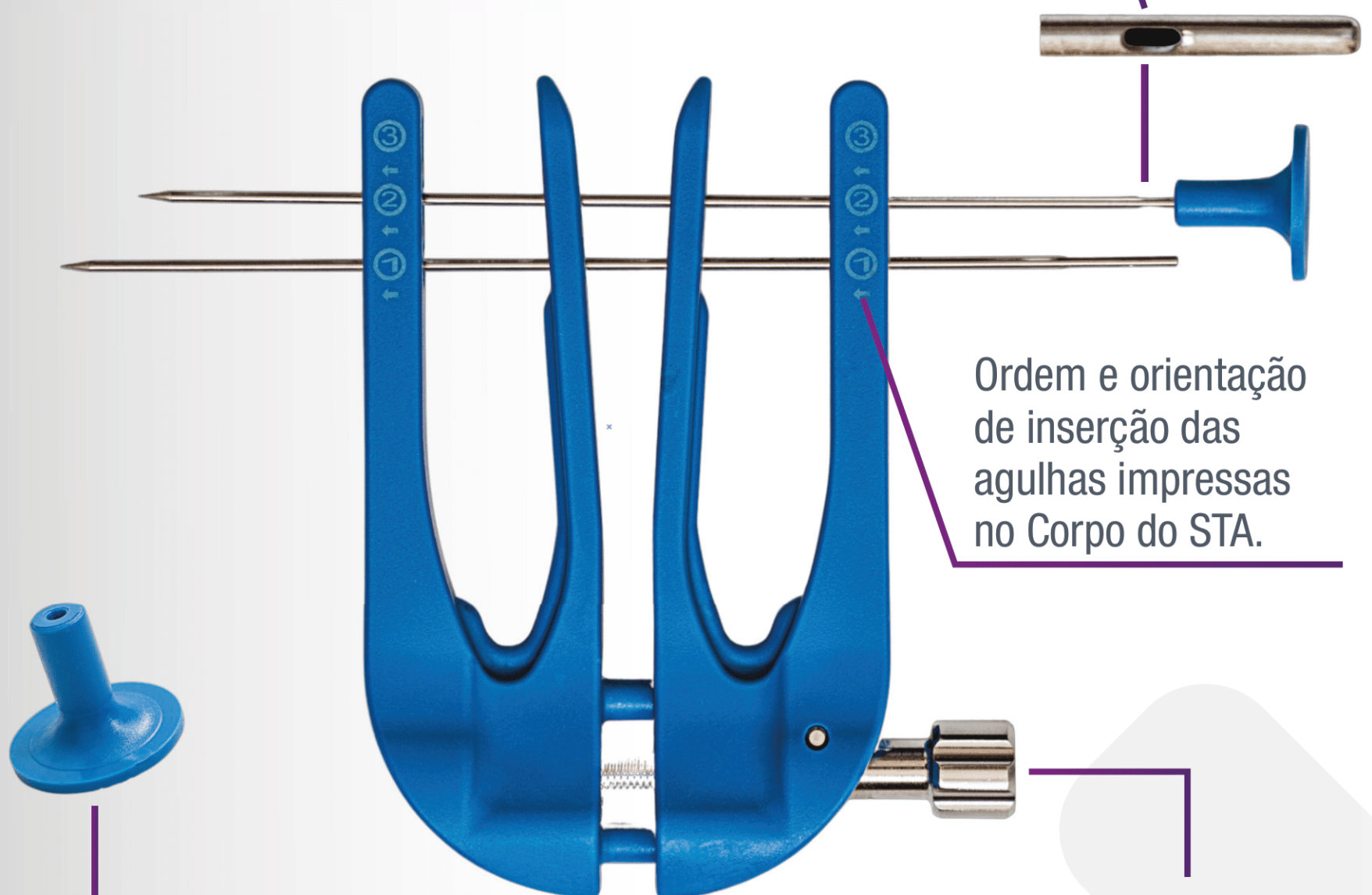

Ordem e orientação  
de inserção das  
agulhas impressas  
no Corpo do STA.



Empurrador de agulhas  
torna o procedimento  
mais seguro e confortável.

Dispositivo de abertura  
e fechamento dos  
braços internos do STA.







# STA

SISTEMA DE SUTURA DO  
TENDÃO DE AQUILES


next  
IMPLANTES  
RIO DE JANEIRO - RJ

## TÉCNICA CIRÚRGICA

Realizar incisão de 1.5 a 2 cm, transversal ao tendão na região do gap clinicamente palpável. Após dissecação romba do tecido celular subcutâneo, incisar o paratendão com orientação longitudinal.

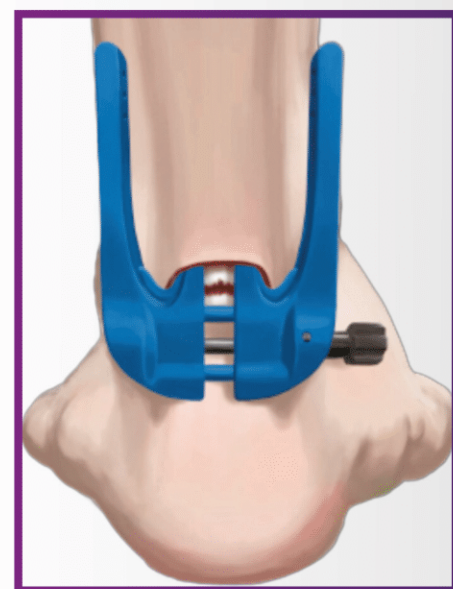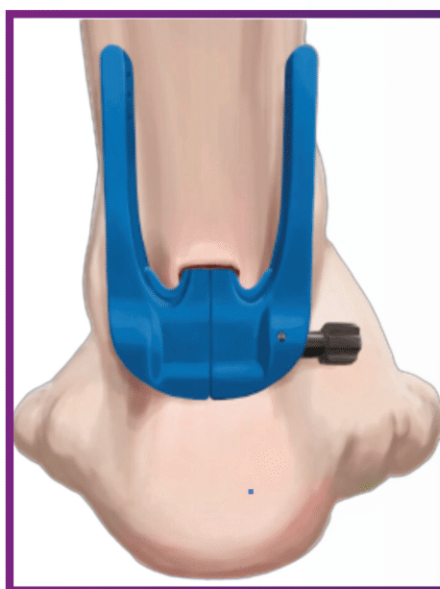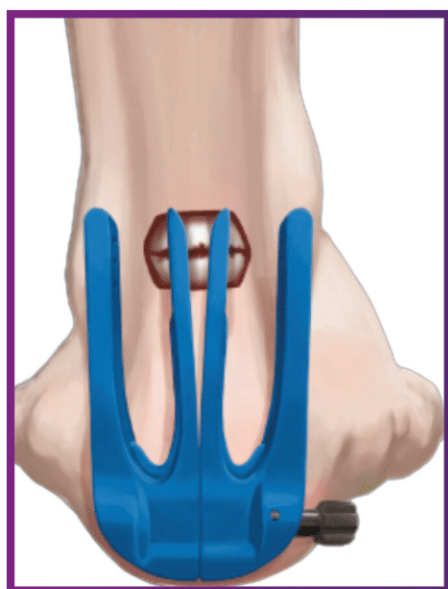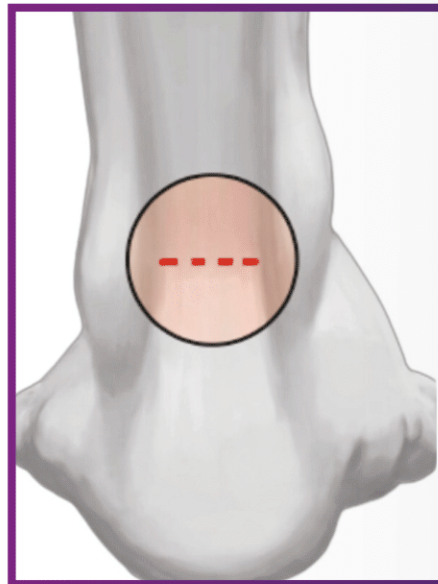

Identificar os cotos do tendão, havendo dificuldade a incisão de pele pode ser ampliada. Através de afastamento gentil das bordas do paratendão, posicionar o coto proximal do tendão centralizado em relação aos braços internos do Corpo Guia STA (223-01-01) com auxílio de um instrumental cirúrgico (Allis ou Kocher). Progredir o Corpo Guia STA cranialmente no espaço entre o tendão e o paratendão, abrindo progressivamente seus braços internos, girando o dispositivo metálico.

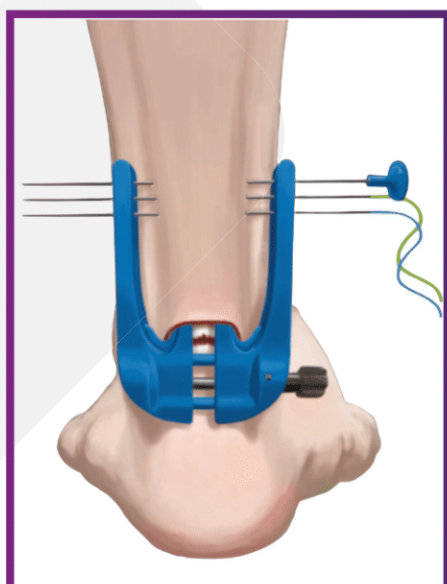


Palpar externamente o tendão e realizar a segunda checagem da correta posição e angulação do Corpo Guia STA. Com auxílio do Empurrador STA (223-01-02), transpassar as três Agulhas STA (223-01-03) pelo Corpo Guia STA, conforme orientação das setas e sequência numérica impressas no Corpo Guia STA.




# STA

SISTEMA DE SUTURA DO  
TENDÃO DE AQUILES


next  
IMPLANTES  
RIO DE JANEIRO - RJ

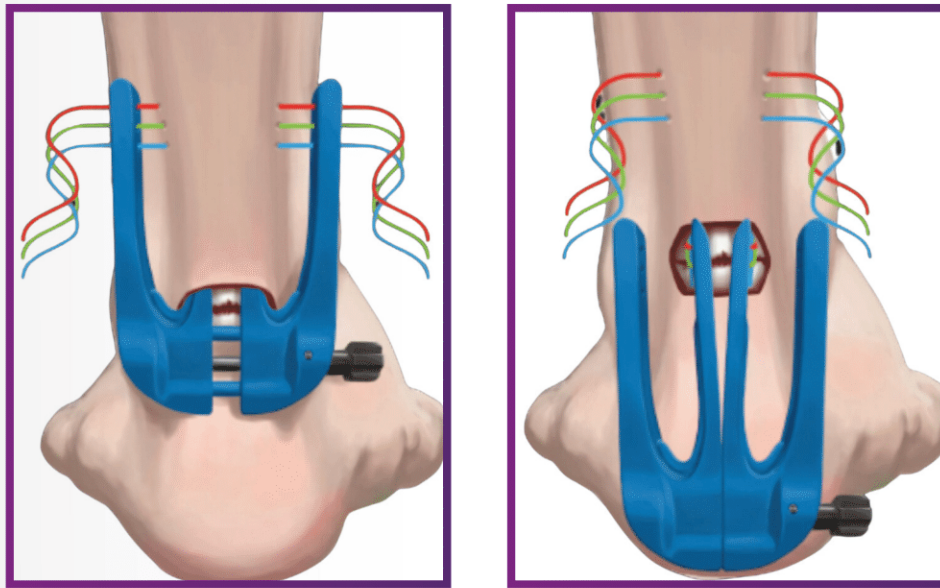

Retirar o Corpo Guia STA delicadamente para evitar danos aos tecidos moles. Enquanto o Corpo Guia STA é retirado, os braços internos são progressivamente fechados, girando o dispositivo metálico.

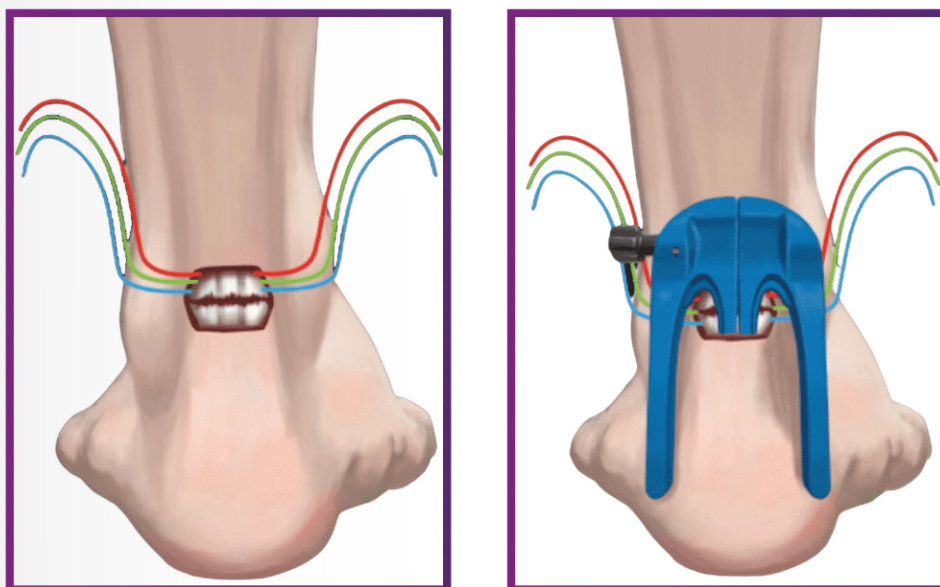

Realizar a mesma sequência de procedimentos no coto distal, onde o Corpo Guia STA deve ser introduzido até que toque o osso calcâneo.

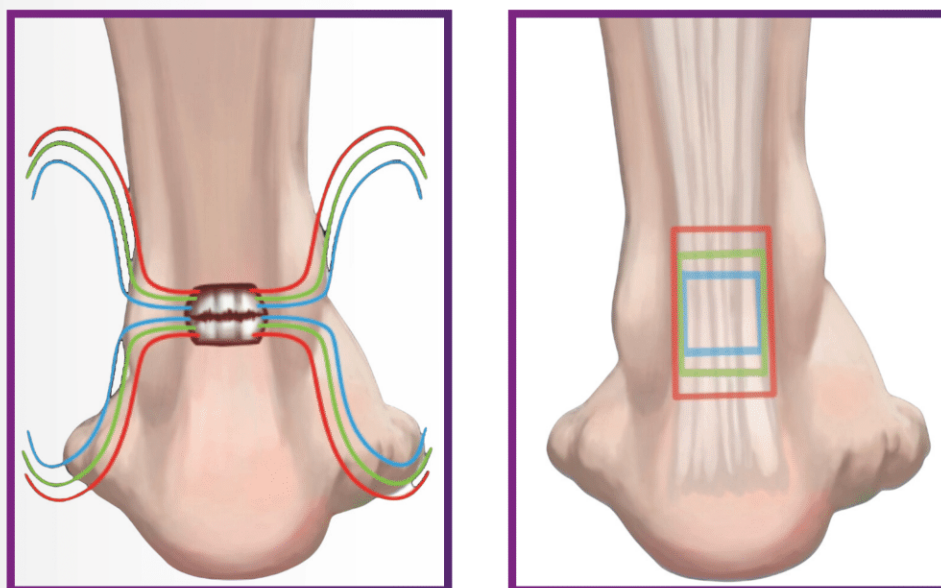

Organizar corretamente os pares de fios de sutura na região de ruptura. A aproximação dos cotos do tendão é controlada sob visualização direta e sua tensão deve ser comparada com a da perna oposta. Os nós das três suturas são realizados, o teste de Thompson deve ficar negativo, e então é realizado o fechamento do paratendão, do tecido celular subcutâneo e da pele.



# STA

SISTEMA DE SUTURA DO  
TENDÃO DE AQUILES

next  
IMPLANTES  
RIO DE JANEIRO - RJ

## KIT STA



CÓDIGO

DESCRIÇÃO

233-01

Sistema de Sutura do Tendão de Aquiles

## FIO DE UHMWPE COM AGULHA

CÓDIGO

MEDIDAS

COR

AGULHA

333-239-AB1226CI

USP 2 – 90 cm

Azul e Branco


1/2 – 26 mm - Ponta Cilíndrica

333-239-PB1226CI

USP 2 – 90 cm

Preto e Branco

1/2 – 26 mm - Ponta Cilíndrica

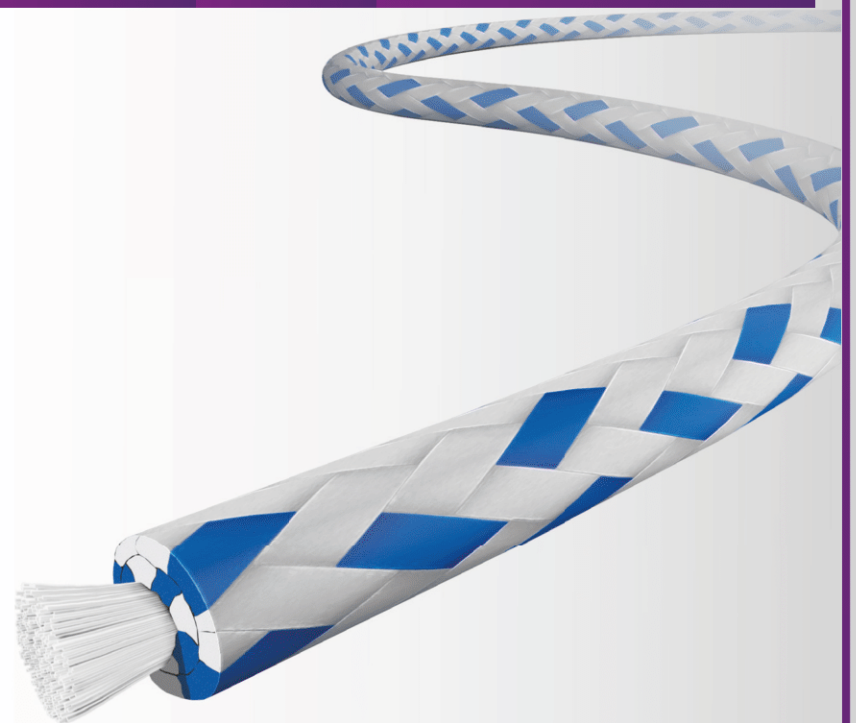


## INDICAÇÕES

- Rupturas agudas do tendão calcâneo localizadas entre 2 a 8 cm da inserção do tendão;
- Rupturas fechadas;
- Ruptura com exposição menor do que 6 horas e sem perda de cobertura cutânea.

## VANTAGENS

- Técnica cirúrgica simples e eficiente;
- Mínima lesão às partes moles circundantes;
- Rápida reabilitação do paciente;
- Material estéril e descartável.



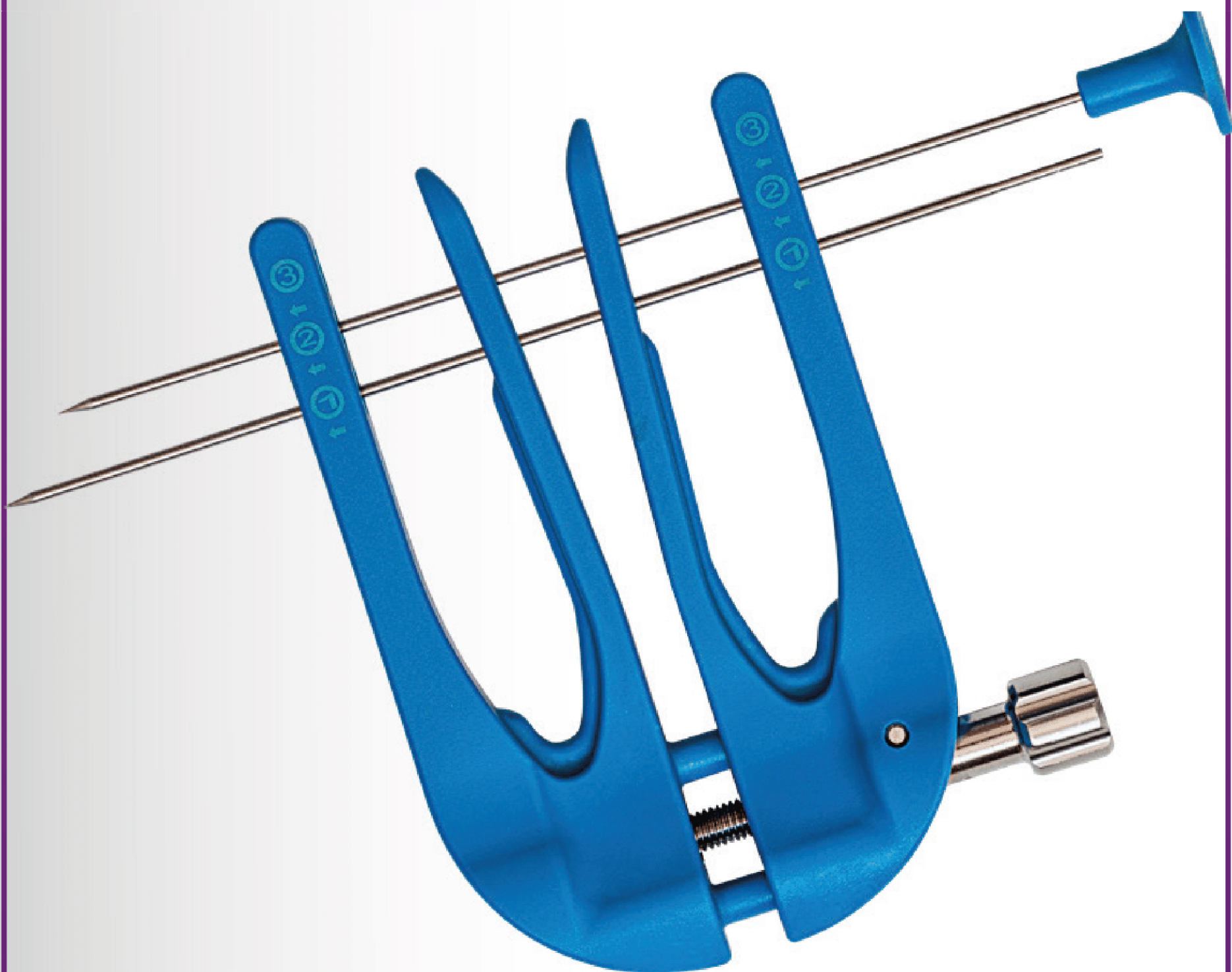

next  
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ 

 **21 3253-2373**

 **21 3253-2374**

Rua Eng. Enaldo Cravo Peixoto, 105 - Salas 1003/1006 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

 | [nextRJ.com.br](http://nextRJ.com.br)

 | [next.implantes](https://www.instagram.com/next.implantes)